

Instrukcja stosowania

Bausch & Lomb Hyal-Drop® multi

Drogi Użytkowniku,

Decydując się zastosować krople Hyal-Drop® multi wybrałeś produkt, który nawilży i przyjemnie odświeży powierzchnię Twoich oczu, a tym samym na długo złagodzi typowe objawy „suchego oka”. Innowacyjne rozwiązanie opatentowanego mechanizmu z pompką sprawia, że krople Hyal-Drop® multi odpowiadają na współczesną wzmożoną potrzebę rozwiązania problemu nawilżania oczu.

- Krople Hyal-Drop® multi nie zawierają konserwantów
- Krople Hyal-Drop® multi mogą być używane przez 12 tygodni (3 miesiące) po otwarciu
- Krople Hyal-Drop® multi zawierają kwas hialuronowy, naturalny biopolimer, obecny w strukturze ludzkiego oka oraz łzach
- Dzięki temu krople Hyal-Drop® multi są bardzo dobrze tolerowane
- Krople Hyal-Drop® multi mogą być stosowane długotrwale
- Krople Hyal-Drop® multi nadają się do nawilżania i zwilżania zarówno miękkich, jak i twardych soczewek kontaktowych i sprawiają, że noszenie soczewek kontaktowych staje się zdecydowanie mniej uciążliwe

- Krople Hyal-Drop® multi są bardzo proste i bezpieczne w użyciu
- Dozownik kropli Hyal-Drop® multi pozwala wydostawać pojedynczą kroplę

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję – zawiera ona ważne informacje dotyczące stosowania tego preparatu. W razie pytań, prosimy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub producentem.

Jakie rozmiary opakowań są dostępne?

Krople Hyal-Drop® multi są dostępne w opakowaniach 10 ml kropli do oczu.

Roztwór zawiera 2,4 mg/ml kwasu hialuronowego Nie zawiera konserwantów.

Kiedy należy stosować krople Hyal-Drop® multi?

Krople Hyal-Drop® multi należy stosować w stanach niedoboru łez (tzw. zespół „suchego oka”), którym towarzyszą takie objawy jak uczucie suchości oka, pieczenie lub zmęczenie oczu. Przyczyną tych objawów może być praca przy monitorze, długotrwałe oglądanie telewizji, suche powietrze w pomieszczeniach, suche powietrze w pomieszczeniach ogrzewanych lub klimatyzowanych, dym papierosowy lub wymuszony nawiew powietrza. Również zażywanie niektórych leków (np. pigułek antykoncepcyjnych), niektóre schorzenia, a także konserwanty zawarte w niektórych kroplach do oczu mogą przyczyniać się do rozwoju zespołu „suchego oka”.

Krople Hyal-Drop® multi poprawiają nawilżenie powierzchni gałki ocznej oraz mogą być stosowane do nawilżania miękkich i twardych soczewek kontaktowych. Krople Hyal-Drop® multi odświeżą i ukoją Twoje oczy. Poczujesz to.

Jak często można stosować krople Hyal-Drop® multi?


W razie potrzeby należy wpuścić jedną kroplę Hyal-Drop® multi do worka spojówkowego. Ponieważ krople Hyal-Drop® multi nie zawierają konserwantów, mogą być używane codziennie, tak często jak to

konieczne. Krople Hyal-Drop® multi są bardzo dobrze tolerowane również w przypadku długotrwałego stosowania.


Jak stosować krople Hyal-Drop® multi:

Opatentowany mechanizm z pompką sprawia, że krople Hyal-Drop® multi są bardzo proste i bezpieczne w stosowaniu.

Przed każdym użyciem, zdjąć osłonkę zabezpieczającą z zakraplacza. Nie dotykać zakończenia pojemnika.

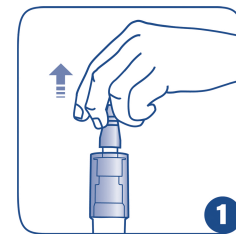

Na rys. 2 pokazano jak trzymać pojemnik, aby bezpiecznie i wygodnie zakropić oko.

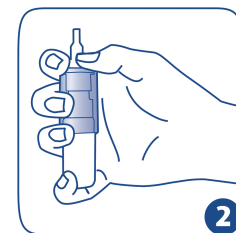


Położyć kciuk i palec wskazujący na okrągłej płytce na zakończeniu pojemnika, a małym palcem przytrzymać dno pojemnika. Palcem środkowym i serdecznym przytrzymać pojemnik z boku.

Przed pierwszym użyciem, należy odwrócić pojemnik i kilkakrotnie nacisnąć dno pojemnika, aż spłynie pierwsza kropla (rys. 3).



Odchylić głowę delikatnie do tyłu trzymając pojemnik nad okiem (rys. 4).

Palcem wskazującym wolnej ręki delikatnie odchylić dolną powiekę. Zakończenie butelki nie powinno dotykać palców, oka lub soczewki kontaktowej.

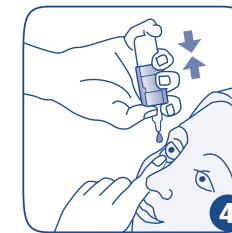


Aby zakropić 1 kroplę Hyal-Drop® multi należy zdecydowanie nacisnąć dno pojemnika. Opatentowany mechanizm z pompką uwolni tylko jedną kroplę. Zamknąć oko i powoli ruszając gałką oczną, rozprowadzić kroplę po powierzchni oka. Po użyciu należy założyć osłonkę zabezpieczającą na zakraplacz.

O czym należy pamiętać stosując krople Hyal-Drop® multi?

Krople Hyal-Drop® multi nie zawierają konserwantów. Opatentowany mechanizm z pompką pozwala na używanie kropli 12 tygodni (3 miesiące) po otwarciu. Hyal-Drop® multi nie należy używać po upływie terminu ważności.

Nadwrażliwość występuje rzadko. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości, przerwać stosowanie kropli.

Kropli Hyal-Drop® multi nie należy używać w przypadku uszkodzenia pojemnika.

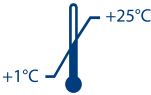

Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165 - 173
DE-13581 Berlin
www.hyal.pl

Przechowywać w temperaturze
od + 1 °C do +25 °C

Nie używać, gdy butelka jest
uszkodzona

Środek leczniczy może być stosowany przez
3 miesiące (= 12 tygodni) po otwarciu

Okres przechowywania (RRRR-MM) - nie
używać po upływie terminu ważności

Numer partii